
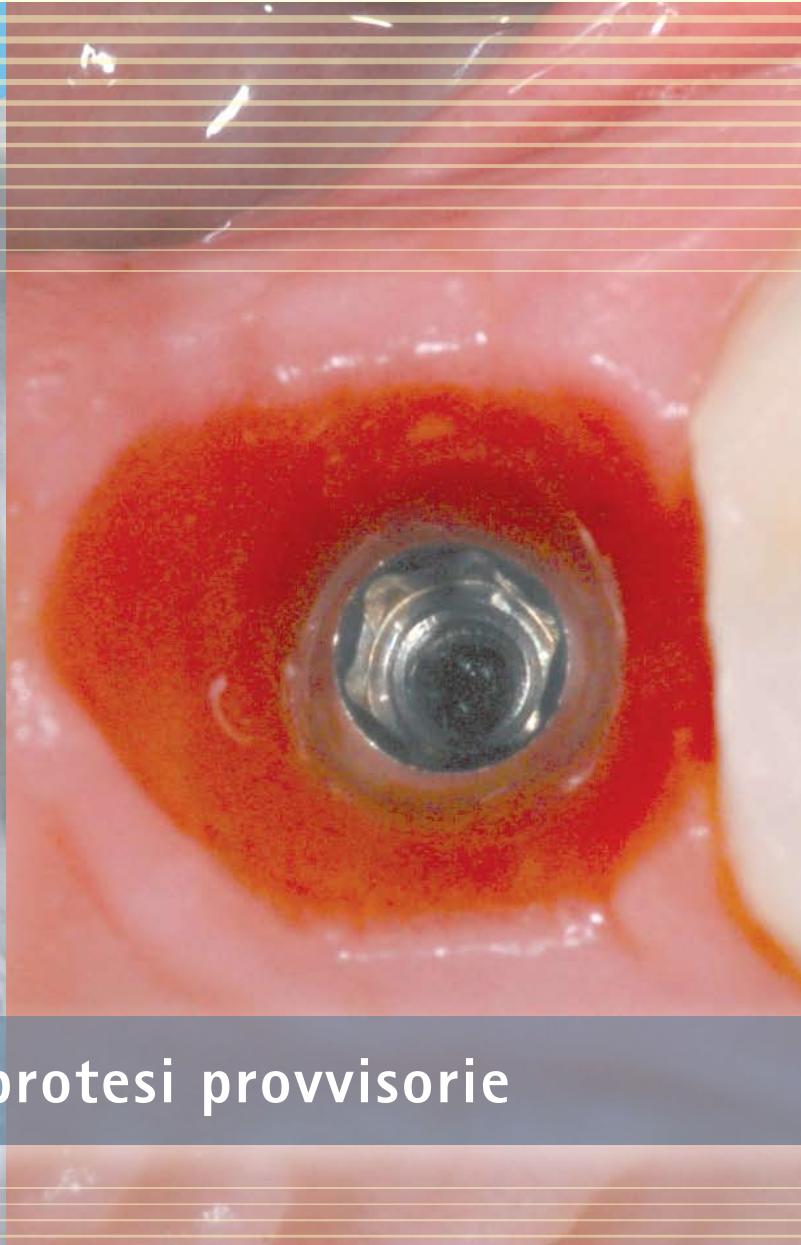


## SKY temp

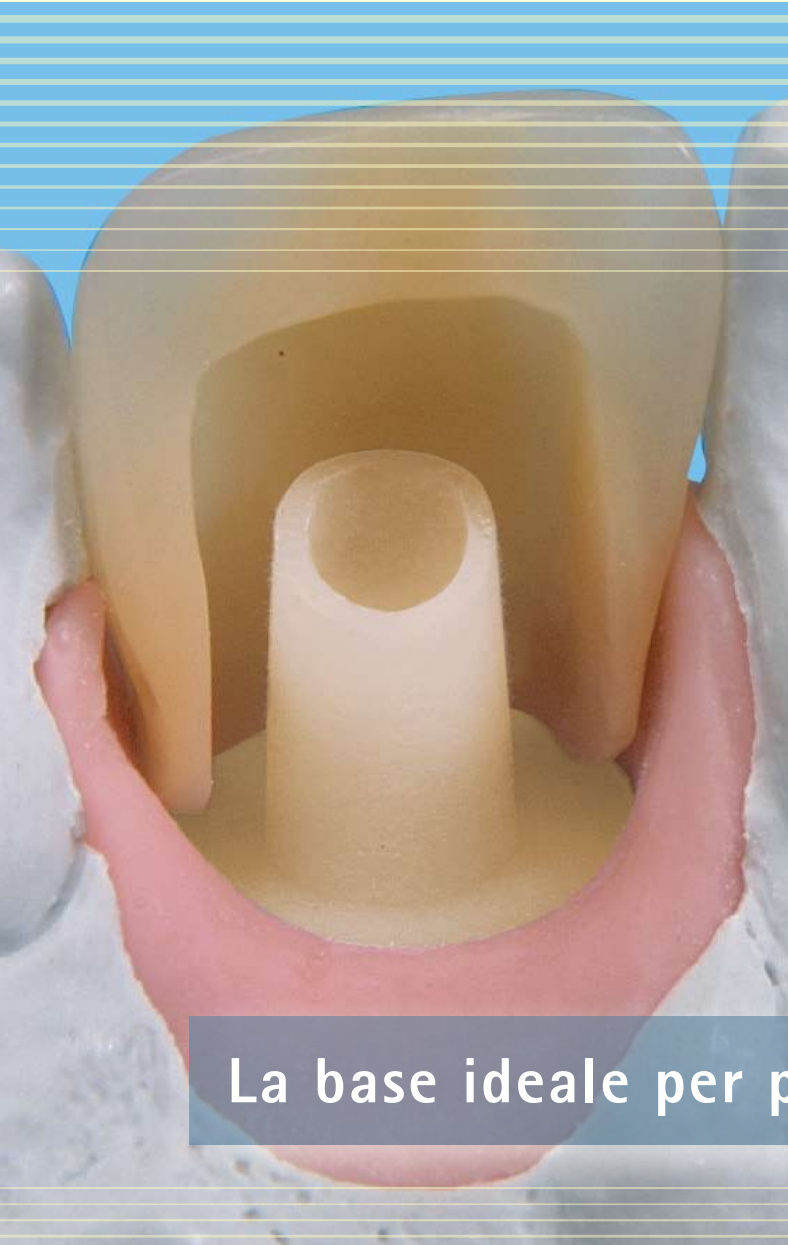

La base ideale per protesi provvisorie

# SKY temp

## La base ideale per protesi provvisorie

Le aspettative dei pazienti in campo implantologico aumentano continuamente. A causa degli impegni sociali e professionali i pazienti desiderano abbreviare il più possibile i tempi di eventuali edentulie. In questo caso le protesi provvisorie sono un'alternativa interessante.

Anche per il moderno concetto dell'implantologia come «Progressive Loading» od «Immediate Loading» questi abutment in resina rappresentano la soluzione ideale.



### Vantaggi:

- ▶ Rimodellamento ottimale del profilo gengivale grazie alle tre forme preconfezionate
- ▶ La superficie estremamente liscia previene le irritazioni della mucosa
- ▶ Realizzare provvisori in modo facile e veloce

### SKY temp come protesi provvisoria



### SKY temp come adattatore gengivale individuale



SKY temp come base per il provvisorio o come adattatore gengivale individuale garantisce un profilo gengivale ottimale del solco.

Un rimodellamento ottimale del profilo gengivale è la base per una protesi altamente estetica e per garantire la soddisfazione dei pazienti.

Foto: Dr. Jochen Alius, IFZI Norimberga



Concava e convessa  
Forma mista per

- ▶ estetica ottimale
- ▶ adattamento ottimale dei tessuti molli

Grazie alla forma concava e convessa, degli abutment SKY esthetic ed al profilo gengivale rimodellato con gli SKY temp, si garantisce un successo predicibile ed a lungo termine del trattamento implantare, con un'estetica eccellente e pazienti soddisfatti.

## Fasi di lavorazione in laboratorio



1 Dopo aver individualizzato l'altezza degli abutment è possibile scegliere la faccetta più indicata.



2



3



4

Con l'apposito materiale per ponti e corone vengono rivestite palatalmente le faccette.



5



6



7



8

Il buon adattamento tra la corona provvisoria e lo SKY temp garantisce il successo del lavoro. In questa zona la frizione è così elevata da poter rinunciare all'incollaggio.

In pochi minuti il paziente ottiene una soluzione gradevole alla sua edentulia.

## Caso clinico



1



2



3



4

Dopo la prova viene realizzato il provvisorio in laboratorio.


Durante la fase di guarigione il provvisorio garantisce un rimodellamento ottimale del solco.



5



6

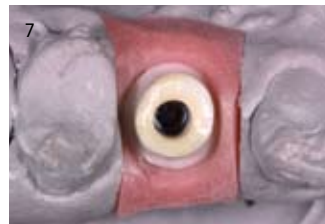

7



8

Dopo la presa dell'impronta può essere realizzata la corona estetica, avvalendosi di un modello con la finta gengiva morbida.

Grazie ad un abutment realizzato individualmente e ad una corona perfetta viene riabilitato il paziente in modo ottimale.

Foto: Dr. Jochen Alius, IFZI Norimberga

## Informazioni sul prodotto



SKY temp S (small)

REF SKYTEMPS


SKY temp M (medium)

REF SKYTEMPM

SKY temp L (large)

REF SKYTEMPL

## Piani terapeutici con SKY temp

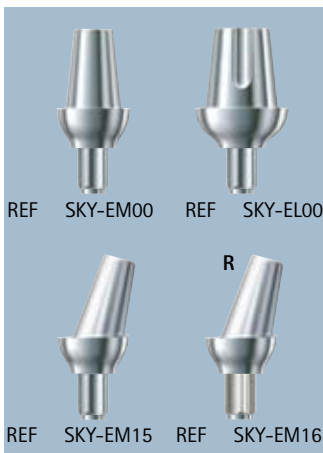

### SKY esthetic line

Gli abutment SKY esthetic, ottimizzati dal punto di vista chirurgico e protesico, completano in modo ideale il sistema SKY temp per garantire un'estetica ottimale. Grazie alla rifinitura è facilmente adattabile alla forma anatomica.

- Abutment dritti con diametri gengivali
  - SKY esthetic M 5,5 mm
  - SKY esthetic L 7,0 mm
- Abutment inclinati 15°
  - Individualizzabile fino a 20°
  - 12 posizioni per un allineamento ottimale



### Multisil-Mask morbido

**Ricostruzione precisa della finta gengiva.**

La lavorazione veloce ed economica, grazie al sistema a cartucce, e lo speciale silicone permettono una facile applicazione direttamente nell'impronta o nella mascherina. La colorazione naturale della finta gengiva facilita la riproduzione del colore del rivestimento estetico. Sono subito riconoscibili sovradimensionamenti nella realizzazione del terzo cervicale.

REF 540 0104 7



### SKY uni.fit Abutment

Abutment individuali realizzati in laboratorio in modo semplice e veloce. Applicato sulla base da incollaggio SKY uni.fit, l'abutment può essere ottimamente adattato al profilo anatomico, rimodellato con SKY temp - a questo scopo l'odontotecnico ha a disposizione tutte le tecnologie; dai sistemi CAD/CAM alla riproduzione con fresatori pantografi, potendo realizzare le strutture con tutti i tipi di materiali: zirconio, leghe auree e resine.

REF SKYUFA00



### visio.lign Sistema di rivestimento estetico

**Scegliere la precisione della forma è la giusta direzione per ottenere il miglior risultato.**

Il sistema di rivestimento estetico visio.lign è composto da faccette estetiche multistrato per gli elementi frontali e diatorici, da idonee masse di caratterizzazione e riempimento, così come da un sistema di incollaggio che si adatta esattamente alle diverse colorazioni. Masse dentinali e di riempimento completano il sistema. Nel caso di protesi a supporto implantare si sommano tra loro estetica, sicura adesione, stabilità di colorazione ed economicità.

Su richiesta, sono disponibili differenti grandezze e colorazioni.

*bredent medical ringrazia i dottori Jochen Alius e Anne Gresskowski, IFZI Norimberga, per il materiale fotografico messo a disposizione.*

Distributore per l'Italia:

bredent s.r.l. Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Tel. 0471 / 469576 · Fax 0471 / 469573 · www.bredent.it · e-mail info@bredent.it

bredent  
medical

