

# Consigli per la cura e la pulizia del Tray chirurgico OT 21



- Subito dopo l'intervento immergere gli strumenti utilizzati in una soluzione disinfettante  
(p.es. una soluzione disinfettante della Komet: DC1)
- Rimuovere tutti gli strumenti e le frese dal tray chirurgico
- Pulire accuratamente il tray chirurgico con un panno morbido ed umido

- Smontare gli strumenti composti da più componenti



- Pulire con una spazzola morbida e sciacquare con acqua corrente



- Disinfettare con una soluzione disinfettante  
(p.es. soluzione disinfettante della Komet: DC1)



- Risciacquare gli strumenti tre volte con acqua distillata



- Asciugare accuratamente con un panno monouso privo di pelucchi. Asciugare le frese con aria compressa priva di olii



- Controllare gli strumenti che non presentino danneggiamenti o corrosione



- Reintrodurli nel tray chirurgico




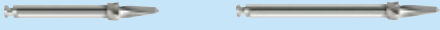






- Avvolgere il tray chirurgico con una pellicola per sterilizzazione, e riporlo in un luogo asciutto e privo di polveri







- Sterilizzare solo poco prima dell'intervento successivo ⇒ 5 minuti a 134° C (+/- 1° C)








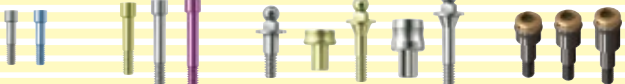
## Consigli per le frese

Descrizione	Velocità	Momento torcente	
Fresa chirurgica	1.000 - 1.200 U/min	max.	
Fresa pilota	1.000 - 1.200 U/min	max.	
Twistdrill	1.000 - 1.200 U/min	max.	
Fresa finale 3,5	300 U/min	max.	
Fresa finale 4,0	300 U/min	max.	
Fresa finale 4,5	300 U/min	max.	
Fresa finale 5,5	300 U/min	max.	
Fresa corticale	300 U/min	max.	

## Consigli per gli impianti

SKY	25 giri/min	30 - 45 Ncm	
blueSKY	25 giri/min	30 - 45 Ncm	
whiteSKY	25 giri/min	30 - 45 Ncm	
miniSKY	25 giri/min	30 - 45 Ncm	

## Consigli per le viti

Vite di guarigione Impianto	25 giri/min	10 Ncm	
Adattatore gengivale Transfert da impronta	25 giri/min	10 Ncm	
Vite trasversale Vite UVE	25 giri/min	18 Ncm	
SKY fast & fixed Vite protesica	25 giri/min	18 Ncm	
SKY temp	25 giri/min	18 Ncm	
Vite Abutment	25 giri/min	25 Ncm	

Distributore per l'Italia:

bredent s.r.l. Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Tel. 0471 / 469576 · Fax 0471 / 469573 · www.bredent.it · e-mail info@bredent.it

bredent  
medical

